



مُعتمد على الإستعمال والعناية المنزلية منفذ تَفْمِيم/قسطرة ألمعدة Mic-Key® (التغذية المعدية عن طريق ثقب في المعدة)

يُنصح القيام بهذا مرةً في اليوم:

1. مُعتمد على الإستعمال والعناية المنزلية Mic-Key® منفذ تَفْمِيم/قسطرة ألمعدة (التغذية المعدية عن طريق ثقب في المعدة).

يُنصح القيام بهذا مرةً في اليوم:

1. إغسل أَلجلد حول الثقب/الفغرة مرةً يومياً وذلك كجزء من العناية الصباحية أو المسائية. يجب المحافظة على نظافة وجفاف أَلجلد حول منطقة الثقب/ألفغرة.
2. إغسل أَلوصلات بواسطة 10-20 مليلتر من الماء وذلك قبْل وبعد الإطعام.

يُنصح القيام بهذا كُل إسبوع:

1. إفحص كمية ألماء الصحيحة في البالون وذلك مرةً في الإِسبوع.
2. إستعمل وصلة جديدة مرةً في الإِسبوع (أو غالباً وحسب الإستعمال).

يُنصح القيام بهذا كل إسبوعين:

1. إنزع جهاز Mic-Key® من الثقب/ألفغرة. إغسل هذا الجهاز بواسطة ماء صابوني /محلول صابوني فاتر. إغسل وجفف جيداً. ملاحظة! أنه من العملي إستعمال جهازين من Mic-Key® بالتبادل، حيث أن ذلك يجعل العناية والتبديل أسرع وأسهل.

</br>

يُنصح القيام بهذا كل شهرين:

عليك أَلنظر إلى جهاز Mic-Key® ومعاملته كوعاء للأكل. لذلك عليك بالتبديل إلى Mic-Key® جديد حوالي كل شهرين، بحيث أن هذا سيصبح فاسد اللون وكذلك أن الصمام أَلأرجوعي سوف يصبح ضعيفاً </br> ملاحظة: عند أَلألم / أَلإزعاج في حالة الإطعام، إقطع الإطعام واتصل بممرضة / طبيب.





نصائح مفيدة

ناسيب الطول الصحيح للثقب / للفرغرة وذلك بمساعدة قضيب مقياس ال-Mic-Key®. أحرص ودائماً على توفّر قضيب المقياس لديك.

- قم بأعمال روتينية /نمطية عند القيام بالعناية بـ Mic-Key®، مثلاً:
إفحص كمية ألماء الصحيحة في البالون كل يوم إثنين.
- إنزع ال-Mic-Key® لغسله وتنظيفه يوم الإثنين من كل إسبوعين
- إستعمل وفكر ينظافة الطعام العادية عند كافة العناية والإطعام بواسطة ال-Mic/Key®. ليس هناك أية ضرورة لإجراءات التعقيم.