

# Mic Introducer kit

Mic Introducer er en innovativ push teknikk for primær anleggelse av ballongsonde som Mic-Key knapp, Mic-Bolus gastrostomitube eller tilsvarende jejunale sonder. Settet er designet spesielt med tanke på sikkerhet og enkelhet sammenlignet med tilsvarende push metoder.

## Hvorfor anleggelse med Mic Introducer kit?

- Kun en enkel prosedyre er nødvendig for å få anlagt en ballongsonde som Mic-Key knapp, Mic-Bolus gastrostomitube eller tilsvarende jejunale sonder. Sondene fra Meda/Halyard er av høy kvalitet og har en lang holdbarhet,- inntil 8 måneder.
- Kun en prosedyre gjør teknikken med pasientvennlig og tidsbesparende for sykehuset
- Mindre risiko for kirurgisk og post-operative komplikasjoner som andre prosedyrer kan forårsake (f.eks. lengre sykehusopphold, perforasjon av colon, vevsskade etc.) <sup>1</sup>
- Innovativ teknikk med unike bestanddeler som gjør prosedyren effektiv og sikker.
- Pasientvennlig:
  - kun en prosedyre nødvendig (unngår PEG sonde først).
  - rapportert mindre lekkasje
  - rapportert mindre infeksjoner
  - enkel rengjøring og stell

*1 Antonoff MB, Hess DJ, Saltzman DA, Acton RD. Modified approach to laparoscopic gastrostomy tube placement minimizes complications. Pediatr Surg Int 2009. Apr;25(4):349-353. 10.1007/s00383-009-2340-z*

## Mic Introducer Kit inneholder:



- **Saf-T-Pexy nåler:** 4 stk. ferdig ladet nåler med resorberbar 3,0 biosyn sutur og ankersystem for sikker og enkel fiksering. De ytre fikseringsbumpere er designet for å være skånsom mot huden og enkel å rengjøre.
- **Serie dilator:** alt i ett som muliggjør en gradvis dilatering, og enkel innføring av sonde til slutt ved hjelp av en innføringshylse
- **Innførings nål** – for innføring av guidewire.
- **Guidewire med j-tip / lede kateter**

- Skalpell
- Pjeng
- Sprøyte
- Målestav

I Kit for Mic jejunale sonder medfølger et "lede kateter".

**Sonde må kjøpes separat**

## Tabell

Velg Fr på Introducer Kit ut i fra den størrelsen på sonden som skal anlegges. Som for eksempel, hvis man velger 12 Fr Introducer Kit (artikkel 98430) ligger det med dilatator som dillaterer 4 Fr over denne størrelsen, altså 16 Fr dilatator.

Tykkelse	Navn	Artikkelnummer
12 Fr	MIC-KEY G-12 F Introducer Kit	98430
14 Fr	MIC-KEY G-14 F Introducer Kit	98431
16 Fr	MIC-KEY G-16 F Introducer Kit	98432
18 Fr	MIC-KEY G-18 F Introducer Kit	98433
20 Fr	MIC-KEY G-20 F Introducer Kit	98434

## ANLEGGELSE AV JEJUNALE SONDER

Tykkelse	Navn	Artikkelnummer
16 Fr	MIC-KEY JTJ 16 F Introducer Kit	98437
18 Fr	MIC-KEY JTJ 18 F Introducer Kit	98438

Videoanimasjon - Direkte anleggelse med Mic Introducer Kit

Endoskopisk teknikk

Her kan du se en animasjonsfilm om hvordan en anlegger Mic Introducer Kit med endoskopisk teknikk.

Mic-Key

Mic Gastrostomitube

---

Mic-Key Transgastric Jejunal

---

Mic Transgastric Jejunal



