



## Mic Peg TR (Traction Removable)

Mic-Peg er en gastrostomislange i silikon med en indre bløt stoppelate som holder Peg sonden på plass i magesekken. En hudvennlig plate skyves ned til hudnivå slik at sonden blir passe stram, og kanalen kan dannes. Mic-Peg er Traction Removable som betyr at man på en gastro-avdeling kan dra den ut via stomikanalen når den skal fjernes. Dette må da gjøres innen 2-4 måneder etter anleggelse mens stoppeplaten fortsatt er bløt. Deretter anbefaler vi at man bruker endoskop ved fjerning. 14 fr. skal ikke dras ut gjennom stomikanalen.

Mic-Peg finnes i størrelsene 14Fr, 20Fr og 24 Fr. Mic-Peg sett inneholder en avstengningsklemme som skal settes på slangen etter anleggelse, samt 2 ulike adaptere. Disse adapterne kan byttes og bestilles separat.

### Mic Peg settet inneholder:

- PEG-sonde
- Guidewire
- Introduser nål
- Skalpell
- Klemme
- PEG-universaladapter
- ENFit - adapter

### MIC PEG MED SLYNGE, ENFIT KOBLING

Artikkelnummer	Tykkelse
9640-14	14 FR
9640-20	20 FR
9640-24	24 FR

### MIC PEG ENFIT ADAPTER

---

Artikkelnummer	Tykkelse
8135-14	14 FR
8135-20	20 FR
8135-24	24 FR

## MIC PEG UNIVERSALADAPTER

---

Artikkelnummer	Tykkelse
136-16	16 FR
136-20	20 FR
136-24	24 FR

---